



Tehotenský test

Ultra včasný

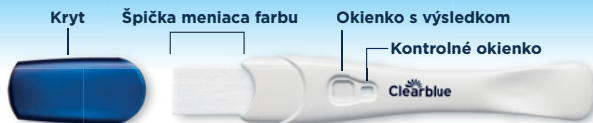

Na samotestovanie.
Pred testovaním si starostlivo
preštudujte tento príbalový leták.

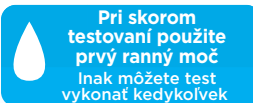

1 Vykonajte test

Test vybalte z fólie, zložte kryt a okamžite použite. Vložte špičku meniacu farbu:



alebo



DÔLEŽITÉ: Podľa vyobrazenia špičku úplne ponorte

DÔLEŽITÉ: Špička meniacu farbu sa okamžite sfarbí na ružovo, čo znamená, že špička absorbovala moč. **Len čo sa špička meniacu farbu sfarbí na ružovo, začnite odpočítanie.**

Znova nasadte kryt a testovaciu tyčinku položte do vodorovnej polohy. Ak špička nie je úplne ružová, prečítajte si časť „Chyby testovania“.

2 Počkejte



V kontrolnom okienku sa môže rýchlo začať objavovať čiara, za pár interpretáciu výsledku však **MUSÍTE POČKAŤ CELE 3 MINÚTY.**

Ak sa nezobrazia modré čiary, prečítajte si časť „Chyby testovania“.

3 Výsledky

Tehotná – Ak je výsledok „Tehotná“, navštívte svojho lekára.

Nie ste tehotná (pozri otázku 2).

Obrázok A



Obrázok B



Obrázok C



Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, prečítajte si otázku 6.

AK SA ZOBRAZIA DVE ČIARY, STE TEHOTNÁ. NEZÁLEŽÍ NA TOM, ČI SÚ ČIARY SLABÉ ALEBO TMAVÉ.

Výsledok bude platný vtedy, ak bude v kontrolnom okienku modrá čiara. Ak to tak nie je, prečítajte si časť „Chyby testovania“.

DÔLEŽITÉ! Výsledok si pozrite do **10 minút** po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny po uplynutí tohto času neberte do úvahy.

? Otázky a odpovede

- Môj výsledok je „Tehotná“. Čo mám robiť?** Navštívte svojho lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať. Môže sa stať, že výsledok bude pozitívny, ale neskôr zistíte, že už viac nie ste tehotná (pozri otázku 7).
 - Môj výsledok je „Nie ste tehotná“. Čo to znamená?** Nemusíte byť tehotná alebo hladina tehotenského hormónu nemusí byť dostatočne vysoká na to, aby ho bolo možné zistiť. Test znova opakujte o tri dni. Ak je výsledok tohto testu „Nie ste tehotná“ a vaša menštruácia sa oneskorí, navštívte svojho lekára.
 - Ako skoro môžem vykonať test?** Tento test sa môže použiť už 6 dní pred omeškaním menštruácie (5 dní pred očakávanou menštruáciou). Keďže hladiny hormónov sa u jednotlivých žien líšia a na začiatku tehotenstva môžu byť tieto hladiny veľmi nízke, môžete byť tehotná, ale stále mať negatívny výsledok. Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje percentuálny podiel tehotenstiev, ktoré boli zistené pri laboratórnom testovaní so vzorkami moču z počiatkových štádií tehotenstva.
- | Dni pred omeškanou menštruáciou | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zistené tehotenstvá | >99 % | >99 % | >99 % | >99 % | 96 % | 79 % |
- Ako test Clearblue funguje?** Tento test určuje prítomnosť tehotenského hormónu hCG (ľudský choriogonadotropín) v moči. Citlivosť testu je 10 mIU/ml. Podľa laboratórnych testov je presnosť tohto testu vyššia než 99 % odo dňa, kedy očakávate menštruáciu.
 - Môžu nejaké lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?** Pred testovaním si vždy prečítajte pokyny výrobcu týkajúce sa liekov, ktoré užívate.

Lieky obsahujúce hCG a niektoré zriedkavé zdravotné stavy môžu spôsobiť nesprávne pozitívne výsledky. Mimomaternicové alebo neďávne tehotenstvo, aj v prípade nedonosenia, môže zapríčiniť nesprávne výsledky. Ak ste v menopauze alebo sa vám bližie, test môže nesprávne určiť tehotenstvo, aj keď v skutočnosti nie ste tehotná.

Tento test by NEMAL byť ovplyvnený hormonálnou liečbou obsahujúcou klomifencitrát, bežnými liekmi proti bolesti, alkoholom, antibiotikami ani antikoncepcívnymi tabletkami. Ak sú výsledky testu neočakávané, obráťte sa na svojho lekára.

- Čo ak nie som presvedčená o správnosti výsledku?** Ak uvidíte dve modré čiary do 10 minút od testovania, znamená to, že ste tehotná bez ohľadu na to, ako slabé alebo tmavé čiary sú.

Výsledky označujúce tehotenstvo

Obrázok A Táto situácia je pravdepodobná vtedy, ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie, kedy hladiny hormónu hCG môžu byť relatívne nízke.

Obrázok B Táto situácia nastáva vtedy, ak testujete približne v deň očakávanej menštruácie, pretože hladiny hormónu hCG môžu byť relatívne nízke.

Obrázok C Táto situácia nastáva vtedy, ak testujete viac než niekoľko dní po omeškaní menštruácie, keďže hladiny hormónu hCG sú vyššie.

Ak stále nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.

- Výsledok predchádzajúceho testu je „Tehotná“, ale výsledok ďalšieho testu je negatívny alebo som medzitým dostala menštruáciu. Čo to znamená?** Môže sa stať, že výsledok bude pozitívny, ale potom zistíte, že už tehotná nie ste. Tento stav sa nazýva „potrat v ranom štádiu tehotenstva“ a nie je zriedkavý – postihuje približne 1 zo 4 tehotenstiev. Väčšina žien môže mať neskôr zdravé tehotenstvo.

www.clearblue.com

Pokyny na použitie testu Clearblue Ultra včasný s označením „CB14“ vytlačeným na obale. Na samotestovanie v domácom prostredí. Iba na diagnostické použitie *in vitro*. Nie je určené na vnútorné použitie. Nepoužívajte opakovane. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote 2 – 30 °C. Ak test skladujete v chladničke, pred použitím ho vyberte a počkajte minimálne 30 minút, kým nedosiahne izbovú teplotu. Nepoužívajte, ak je fóliový obal poškodený. Nepoužívajte po dátume najneskoršej spotreby. Zlikvidujte s bežným komunálnym odpadom. Pomôcku nerozoberajte. Obsahuje malé časti. Ziadna časť tejto pomôcky nie je vhodná na konzumáciu. V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc. Akékoľvek zranenie spôsobené použitím tohto produktu nahláste spoločnosti Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švajčiarsko.

Clearblue je ochrannou známkou spoločnosti SPD. © 2021 SPD. Všetky práva vyhradené. S otázkami týkajúcimi sa produktov sa obráťte na zákaznícku podporu na nižšie uvedenej adrese:-

Fidia Pharma Slovakia s.r.o., Krajinská 87, 821 06 Bratislava, Slovensko

LOT	Číslo šarže	IVD	Diagnostická zdravotnícka pomôcka na použitie <i>in vitro</i>	Výrobca
	Dátum najneskoršej spotreby		Obmedzenie teploty 2 – 30 °C	Nepoužívajte opakovane

79 % výsledkov označujúcich tehotenstvo je možné zistiť 6 dní pred omeškanou menštruáciou (5 dní pred očakávanou menštruáciou).

! Chyby testovania

Špička meniacu farbu sa úplne nesfarbí na ružovo.

Možno ste nepoužili dostatok moču. Ak sa kontrolná čiara objaví do 10 minút od testovania, je isté, že test bol úspešný.

V kontrolnom okienku sa do 10 minút po vykonaní testu modrá čiara neobjaví. Test neprebehol úspešne, pravdepodobne preto, že ste použili príliš veľa alebo príliš málo moču. Opakujte test – použite nový test a starostlivo dodržiavajte pokyny.

Okienko s výsledkom

